


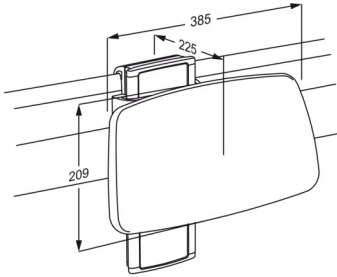

PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R6530112000
Farbe	VVS:777538600 NRF:6190622 EAN:5708590314488 HMI: 71808 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Weiß
Produkt- beschreibung	 PLUS Rückenlehne, 385 mm, gepolstert. Um 150 mm höhenverstellbar auf senkrechter Wandschiene und seitlich verschiebbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Material: Aluminium, PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten). PLUS Rückenlehne, 385 mm, gepolstert. Um 150 mm höhenverstellbar auf senkrechter Wandschiene und seitlich verschiebbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Material: Aluminium, PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).
Verstellung	Höhen- und seitlich verstellbar
Höhenverstellung	150 mm
Produktkapazität	Maximale Belastbarkeit: 100 kg.
Materialien	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.
Ergonomie	Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an.
Funktionen	Der Rückenlehne kan mit eingebautem Spülkasten verwendet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
Produktnummer	R6530112000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitze und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
Produktnummer	R6530112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®