




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R4580182
<b>Farbe</b>	Hellgrau
<b>Produktbeschreibung</b>	 <p>PLUS Waschtisch-Lifters sind in elektrisch, pneumatisch und manuell höhenverstellbaren Versionen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Waschtisch-Lifter. Um 240 mm höhenverstellbar mithilfe eines Hebels, seitlich verschiebbar. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2064/R2065. Hellgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und ABS-Polymer. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. waagerechter PLUS Wandschiene.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Höhen- und seitlich verstellbar 240 mm Maximale Belastbarkeit: 135 kg. Geeignet für Waschtische von 16-22 kg. Bei einer Belastung mit 135 kg, trägt jede Befestigungsschraube 30 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. <b>Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt.</b> Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschbeckens bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 135 kg und das Gewicht des Waschtisches 20 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 153 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
<b>Materialien</b>	Der Waschtisch-Lifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtisch-Lifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.

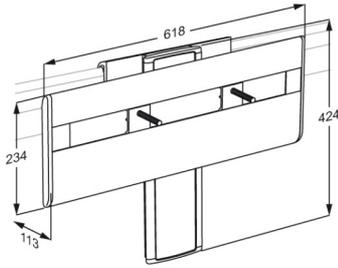

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R4580182
<b>Ergonomie</b> <b>Funktionen</b>	<p>Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert.</p> <p>Wenn die Höhe des Waschtisches nur gelegentlich verändert werden soll, kann ein manuell verstellbarer Waschtisch-Lifter die richtige Lösung sein.</p> <p>Wichtig: Nicht für die tägliche Höhenverstellung geeignet. Für Anwendung, die eine tägliche Höhenverstellung fordert, wird die Variante mit Gasdruckzylinder R4680 oder die elektrische Variante R478x empfohlen.</p>
<b>Garantie</b>  <b>Reinigung</b>	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Lysoformin Spezial</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R4580182

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®